

Patientenfotos eindeutig zuordnen und wiederfinden

Diese Zwei-Seiten-Checkliste hilft dem Praxisteam, Patient, Sitzung, Fotoprotokoll und Ansicht als zusammenhängenden Workflow zu testen. Sie ist keine Patientenakte und darf keine Namen, IDs, Bilder oder sonstigen Patientendaten enthalten.

NUR MIT DEMO-FALLDATEN

Den gesamten Ablauf zuerst mit frei erfundenen Daten und synthetischen Aufnahmen durchspielen.

01 Praxisstandard vorbereiten

Verantwortlich für den Workflow	
Getesteter Fotostatus	
Vorgesehenes Speicherziel	
Version / nächste Prüfung	

- ☐ Das Team verwendet eine gemeinsame, verständliche Bezeichnung für den Fotostatus.
- ☐ Es ist festgelegt, wann eine neue Sitzung beginnt und wer sie abschließt.
- ☐ Die vorgesehenen Ansichten sind eindeutig benannt und in einer festen Reihenfolge angeordnet.
- ☐ Der Übergabeweg in Praxissoftware, Archiv oder Praxis-SSD ist dokumentiert.
- ☐ Für Fehlsuordnungen und fehlgeschlagene Übergaben gibt es einen benannten Korrekturweg.

02 Vor dem ersten Foto

Diese Prüfung wird bei jeder neuen Serie aktiv durchgeführt.

- ☐ Identität am Behandlungsstuhl mit dem ausgewählten Fall abgeglichen.
- ☐ Richtiger Patient und richtige Sitzung in OralCapture sichtbar.
- ☐ Passendes Fotoprotokoll für den festgelegten Aufnahmezweck gewählt.
- ☐ Speicherziel und benötigte Verbindung sind bereit.
- ☐ Zubehör und Aufnahmesituation sind vorbereitet.

Serie kontrollieren, übergeben und wiederfinden

Die Checkliste prüft nicht die medizinische Eignung eines Bildes. Diese fachliche Bewertung bleibt beim qualifizierten Praxisteam.

03 Während der Serie und vor dem Abschluss

- ☐ Alle Aufnahmen entstehen im sichtbaren Patienten- und Sitzungskontext.
- ☐ Zusatzaufnahmen bleiben derselben Sitzung nachvollziehbar zugeordnet.
- ☐ Schärfe, Belichtung und Bildausschnitt direkt kontrolliert.
- ☐ Vorgesehene Ansichten vollständig; fehlende Bilder jetzt wiederholt.
- ☐ Patient, Sitzung und Fotoprotokoll vor dem Abschluss erneut geprüft.

04 Übergabe am Ziel kontrollieren

- ☐ Serie über den festgelegten Weg an das vorgesehene Speicherziel übergeben.
- ☐ Ziel geöffnet und richtige Demo-Serie dort tatsächlich gefunden.
- ☐ Patient, Sitzung, Fotoprotokoll und Ansichten am Ziel nachvollziehbar.
- ☐ Keine ungeklärte Kopie in einer allgemeinen Fotomediathek oder in Zwischenordnern verblieben.
- ☐ Fehler dokumentiert und an die verantwortliche Person übergeben.

05 Wiederfindbarkeits-Test mit Demo-Falldaten

Eine zweite, an der Aufnahme nicht beteiligte Person sucht die synthetische Serie nur über die vereinbarten Ebenen.

Demo-Patient gefunden über	
Sitzung gefunden über	
Fotoprotokoll gefunden über	
Einzelne Ansicht gefunden über	

- ☐ Die Serie war ohne Zuruf oder persönliches Zusatzwissen auffindbar.
- ☐ Unklare Bezeichnungen oder Prozessbrüche wurden notiert.
- ☐ Verantwortliche Person und Termin für die Anpassung sind festgelegt.

NÄCHSTER SCHRITT

Foto-Workflow ansehen: oralcapture.app/dentale-fotografie-workflow

06 Notizen und nächste Anpassung

Beobachteter Prozessbruch	
Vereinbarte Änderung	
Verantwortliche Person	
Umsetzung prüfen am	